

Certains médicaments ou certaines conditions médicales peuvent altérer le résultat de votre test de grossesse :

- Lisez systématiquement la notice des médicaments que vous prenez avant de faire un test.
- Les médicaments contre la stérilité contenant des hCG peuvent entraîner des résultats erronés (ces médicaments contre la stérilité sont habituellement administrés par injection et un test trop rapproché par rapport à la dernière injection peut générer un résultat « Enceinte » erroné).
- Les autres médicaments contre la stérilité (tels que le citrate de clomifène), les analgésiques et les contraceptifs hormonaux (pilules contraceptives, par exemple) ne devraient pas affecter le résultat.
- Si vous avez récemment arrêté votre contraception hormonale ou si vous utilisez des traitements contre la stérilité comme le citrate de clomifène, vos cycles peuvent être irréguliers, ce qui pourrait vous amener à effectuer le test trop précocement.
- Si vous avez été enceinte récemment (même sans avoir mené votre grossesse à terme), il se peut que vous obteniez un résultat « Enceinte » erroné.
- Une grossesse extra-utérine, des kystes ovariens, la ménopause et de très rares pathologies peuvent également fausser les résultats.
- Si vous obtenez un résultat « Enceinte », il est possible que vous receviez ultérieurement un résultat négatif en raison d'une fausse couche pouvant survenir naturellement au cours des premiers stades de la grossesse.

Si vous obtenez des résultats inattendus, parlez-en à votre médecin.

Le Moniteur de fertilité Clearblue Advanced vous permet de déterminer si vous êtes enceinte en détectant la présence de l'hormone de grossesse, l'hCG, dans vos urines. Il a été démontré en laboratoire que le mini-ordinateur est fiable à plus de 99 % pour détecter une grossesse à partir de la date présumée de début des règles.

Clearblue vous recommande d'effectuer le test à partir de la date présumée du début de vos règles. La concentration en hormones de grossesse augmente toutefois rapidement au début d'une grossesse et le Moniteur de fertilité Clearblue Advanced peut être utilisé pour déterminer si vous êtes enceinte jusqu'à 3 jours avant la date présumée du début de vos règles. Lors d'essais cliniques réalisés à partir d'échantillons prélevés en tout début de grossesse, le Moniteur de fertilité Clearblue Advanced a fourni les résultats suivants :

Nombre de jours avant la date présumée du début des règles	% d'échantillons de femmes enceintes donnant un résultat « Enceinte »
-1	96 %
-2	91 %
-3	74 %

Clearblue

ADVANCED
Moniteur de fertilité
Notice relative au test
de grossesse



Ces tests doivent uniquement être utilisés comme tests de grossesse avec le Moniteur de fertilité Clearblue Advanced. Ils ne peuvent pas être utilisés avec un autre mini-ordinateur Clearblue. Vous devez lire les instructions fournies avec votre mini-ordinateur avant d'utiliser ces tests. Lorsque vous utilisez le mini-ordinateur pour la première fois, vous devez paramétrer un nouveau cycle avant d'effectuer un test de grossesse.

Si vous avez perdu le manuel de votre mini-ordinateur, vous pouvez en demander un autre en appelant notre ligne d'information Clearblue ou en téléchargeant une copie sur www.clearblue.com.

Quelle est la fiabilité du Moniteur de fertilité Clearblue Advanced ?

Il a été démontré en laboratoire que le Moniteur de fertilité Clearblue Advanced était fiable à plus de 99 % pour détecter les grossesses à partir de la date présumée du début des règles.

www.clearblue.com

Nos conseillères sont disponibles du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, sauf jours fériés.

0805 54 02 67


Appel gratuit depuis un poste fixe, peut être facturé depuis un mobile. Tous les appels sont enregistrés et peuvent être contrôlés pour assurer la qualité du service. Merci d'indiquer le numéro de lot.

Français

Le résultat de votre test de grossesse



Votre résultat est « Enceinte » et vous devriez consulter votre médecin afin qu'il vous conseille sur les démarches à suivre.

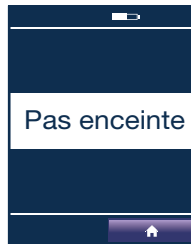

Votre résultat est « Pas enceinte ». Il se peut que vous ne soyez pas enceinte ou, si vous avez effectué le test avant la date présumée du début de vos règles, que la concentration en hormones de grossesse ne soit pas suffisamment élevée pour être détectée. Faites à nouveau un test à la date présumée du début de vos règles.

Si vous effectuez un test le jour présumé du début de vos règles et que le résultat est toujours « Pas enceinte », vous pouvez refaire un test trois jours plus tard. Si ce test indique un résultat « Pas enceinte » et que vous n'avez toujours pas eu vos règles, consultez votre médecin.

Erreurs de test

Si une erreur survient au cours de la phase de test, l'écran affichera un message d'erreur. Reportez-vous au manuel d'utilisation du mini-ordinateur pour de plus amples renseignements.

Clearblue est une marque commerciale.
SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH,
47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy,
Genève, Suisse.
© 2015 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.
Tous droits réservés.

Tenir hors de portée des enfants.

Pour diagnostic *in vitro*. **IVD**
Ce test est destiné à un usage privé uniquement.
Ne pas ingérer.
Non prévu pour un usage interne.
Conserver dans un endroit sec à température ambiante.
Ne pas utiliser un test si sa pochette protectrice est abîmée.
Ne pas utiliser un test dont la date de péremption est dépassée.



	Fabricant		Ne pas réutiliser
	Numéro de lot		Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>
	À utiliser avant la date		Limites de température 2 °C - 30 °C

Test

Le mini-ordinateur demandera uniquement de faire des tests de fertilité. Il estimera la date de début de vos règles, mais vous pouvez faire un test de grossesse n'importe quel jour, à condition d'avoir défini un cycle. Vous pouvez effectuer un test une seule fois pendant votre plage horaire. Toutefois, si vous obtenez un message d'erreur, vous pouvez recommencer en utilisant un nouveau test réactif. Si vous voulez recueillir vos urines pour effectuer un test plus tard (par exemple, si vous avez besoin d'aller aux toilettes avant le début de la plage horaire), utilisez un récipient propre et sec et conservez-le à température ambiante jusqu'à ce que vous soyez prête à faire le test. Pensez à bien effectuer le test au cours de la plage horaire définie.


- 1 Lorsque vous êtes prête à effectuer le test, sélectionnez le test approprié. Les tests de grossesse sont dans une pochette blanche.



- 2 Ouvrez la pochette, prenez le test et utilisez-le immédiatement.



Ne tenez pas le test réactif en dirigeant la tige absorbante vers le haut car cela pourrait avoir une incidence sur le résultat.

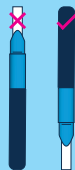

- 4 Choisissez votre méthode de test :

Sous votre jet d'urine

Pointez la tige absorbante vers le bas et maintenez-la sous votre jet d'urine pendant 3 secondes seulement.



OU

Dans un récipient


Vous pouvez également recueillir vos urines dans un récipient propre et sec puis tremper uniquement la tige absorbante dans l'urine, comme indiqué, pendant 15 secondes seulement.



- 5 Retirez le capuchon.



- 6 Placez le capuchon sur la tige absorbante. Essayez l'excès d'urine.

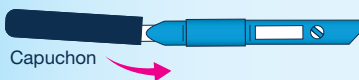


- 7 Insérez immédiatement le test réactif dans le mini-ordinateur. Si le mini-ordinateur est éteint, allumez-le et attendez que l'écran Clearblue disparaisse avant d'insérer le test réactif.

- 8 Localisez la fente d'insertion.



- 9 Tenez le mini-ordinateur à plat ou posez-le sur une surface plane.


- 10 Insérez le test réactif de façon à ce que l'encoche du test soit dirigée vers le bas et que la partie colorée du test soit située à droite de la fente d'insertion.

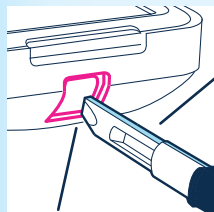

Encoche du test réactif dirigée vers le bas



- 11 Poussez le test réactif jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

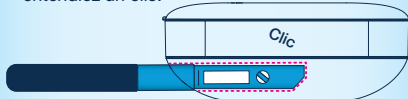

À NE PAS FAIRE

Ne pas insérer la tige absorbante dans le mini-ordinateur.



Ne pas insérer le test réactif avec l'encoche dirigée vers le haut.



Ne pas insérer le capuchon dans le mini-ordinateur.



- 12 Le mini-ordinateur confirmera que le test réactif est inséré correctement et déterminera s'il s'agit d'un test de fertilité ou d'un test de grossesse. Une fois cette procédure effectuée, un compte à rebours s'affichera à l'écran.



Ne retirez pas le test réactif durant le compte à rebours. Si vous retirez le test réactif trop tôt, un message d'erreur va s'afficher.

L'écran va s'éteindre après 1 minute mais le mini-ordinateur continuera d'analyser le test réactif. Le voyant de test va clignoter.

- 13 Patientez 5 minutes pour obtenir votre résultat.

- 14 Si vous rallumez le mini-ordinateur, l'écran affichera le temps pendant lequel vous devez attendre. Lorsque le test sera terminé, l'alarme sonnera et le voyant du test s'arrêtera de clignoter.

- 15 Si le mini-ordinateur est éteint, rallumez-le et retirez le test réactif.

- 16 Lisez votre résultat. Le résultat est lisible uniquement sur le mini-ordinateur et ne peut être déterminé par les lignes que vous pourriez voir sur le test réactif.

- 17 Jetez le test réactif avec vos déchets ménagers ordinaires. Un test réactif ne doit pas être réutilisé.