

Clearblue

DIGITAL

Test de Grossesse

Avec estimation de l'âge de la grossesse
Test d'autodiagnostic

Si vous testez à partir de la date présumée des règles, vous pouvez faire le test à n'importe quel moment de la journée.
Si vous testez avant la date présumée des règles, utilisez les 1ères urines du matin.
Dans tous les cas, pour obtenir le résultat le plus précis possible de l'estimation de l'âge de la grossesse, testez avec les 1ères urines du matin.
Évitez toute ingestion excessive de liquide avant de procéder au test.
Veillez lire attentivement la présente notice avant de faire le test.

1 FAIRE LE TEST

Lorsque vous êtes prête à faire le test, retirez le bâtonnet-test de sa pochette protectrice et enlevez le capuchon bleu. Utilisez le bâtonnet-test immédiatement après.

Tester votre flux d'urine

SOIT

Recueillir un échantillon d'urine dans un récipient propre et sec

- Maintenez la tige absorbante orientée vers le bas sous le flux d'urine **pendant 5 secondes exactement**.
- Prenez soin de ne pas mouiller le reste du bâtonnet-test.
- Vous pouvez replacer le capuchon si vous le souhaitez. Vous pouvez continuer à maintenir le bâtonnet-test orienté vers le bas ou le poser à plat.



- Maintenez la tige absorbante orientée vers le bas dans l'urine comme indiqué ci-dessous **pendant 20 secondes exactement**.
- Vous pouvez replacer le capuchon si vous le souhaitez et poser le bâtonnet-test à plat.



2 ATTENDRE

- Le « sablier » clignote pour vous indiquer que le test est en cours.
- Votre résultat apparaît lorsque le sablier cesse de clignoter. Si le sablier n'apparaît pas après avoir fait le test, ce dernier n'a pas fonctionné correctement, *reportez-vous à la question 6* du forum des Questions/Réponses.



Durant le test, ne maintenez **jamais** le bâtonnet-test orienté vers le haut.

3 Lire votre résultat

Le test de grossesse Clearblue Digital fournit une **estimation de l'âge de la grossesse**. Ces informations s'affichent sur l'écran avec un résultat « Enceinte ».

- L'écran affiche votre résultat dans les **3 minutes**. Dans le cas contraire, consultez la rubrique "erreurs de test".
- Un résultat « Enceinte » peut s'afficher sur l'écran **avant** le résultat de l'estimation de l'âge de la grossesse. **Attendez** jusqu'à ce que le sablier cesse de clignoter pour visualiser le résultat de l'estimation de l'âge de la grossesse. Cette procédure peut prendre jusqu'à 3 minutes.
- Certains résultats peuvent apparaître en moins d'1 minute.
- Votre résultat reste affiché à l'écran pendant 24 heures environ.
- Si votre résultat est « Enceinte », consultez votre médecin qui vous indiquera les étapes et les démarches à suivre. Votre médecin datera votre grossesse.
- La conception intervient environ deux semaines avant la date présumée de début de vos prochaines règles. Le test vous fournit une estimation de l'âge de la grossesse.

- L'estimation de l'âge de la grossesse est fiable à 92% en moyenne. Cette estimation repose sur la quantité d'hormone de grossesse hCG (gonadotrophine chorionique humaine) présente dans vos urines. La quantité de hCG varie d'une femme à l'autre, c'est pourquoi cette estimation peut être erronée. La fiabilité du résultat « Enceinte/Pas Enceinte » est de plus de 99 % lorsque le test est réalisé à compter de la date présumée des règles.

Erreurs de test

Veillez lire la section « Erreurs de test » si vous avez utilisé le bâtonnet-test et que l'écran n'indique aucun des résultats figurant sur cette page.

Interprétation des résultats

Résultats	Semaines à partir de la conception environ
	Votre résultat est « Pas Enceinte » Consultez la question 12 des Questions et Réponses.
	Votre résultat est « Enceinte » et la conception remonte à environ 1 à 2 semaines.
	Votre résultat est « Enceinte » et la conception remonte à environ 2 à 3 semaines.
	Votre résultat est « Enceinte » et la conception remonte à plus de trois semaines.

Avec estimation de l'âge de la grossesse

FORUM DES QUESTIONS-RÉPONSES

- Comment fonctionne le test de grossesse Clearblue Digital ?** Quand vous êtes enceinte, votre corps sécrète l'hormone de grossesse hCG (gonadotrophine chorionique humaine). La quantité de hCG présente dans votre organisme augmente dès les premiers stades de la grossesse. Clearblue peut détecter des quantités infimes de cette hormone dans vos urines. (La sensibilité de ce test est de 25 mIU/ml). Le test propose une estimation de la date de conception, en fonction de la quantité de hCG présente dans vos urines.
- Quelle est la précision de détection d'une grossesse du test de grossesse Clearblue Digital ?** Dans les tests en laboratoire, le test de grossesse Clearblue Digital offre une fiabilité de plus de 99% (à partir de 25mIU/ml) de hCG pour détecter si vous êtes ou non enceinte lorsqu'il est utilisé à compter de la date présumée de vos règles. Si vous effectuez le test avant la date présumée de vos règles et que vous obtenez un résultat « Pas Enceinte », vous pouvez tout de même être enceinte. Refaites un test à la date présumée de vos règles. Consultez la question 4.
- Quelle est la précision de l'estimation de l'âge de la grossesse Clearblue Digital ?** L'estimation de l'âge de la grossesse est fiable à 92% en moyenne. L'estimation est fondée sur le taux d'hCG dans votre urine. La quantité de hCG varie d'une femme à l'autre, c'est pourquoi cette estimation peut être erronée. Si vous effectuez le test plus de six semaines après la conception, le test peut fournir des résultats surprenants. Cela est dû au fait que la quantité de hCG dans les urines est alors trop élevée pour que le test fournisse une estimation précise de la durée écoulée depuis la conception.
- Quand puis-je effectuer un test avec le test de grossesse Clearblue Digital ?** Le test de grossesse Clearblue Digital peut être utilisé jusqu'à 4 jours avant la date présumée des règles. Si vous effectuez le test avant la date présumée de vos règles et que vous obtenez un résultat « Pas Enceinte », vous pouvez tout de même être enceinte. Refaites un test à la date présumée de vos règles.

Détection précoce de la grossesse

Clearblue vous recommande de réaliser le test à partir de la date présumée de vos règles. Cependant, la concentration de l'hormone de grossesse augmente rapidement au début de la grossesse. Clearblue peut être utilisé jusqu'à 4 jours avant la date présumée des règles. Lors de tests cliniques portant sur des échantillons prélevés en tout début de grossesse, Clearblue a été susceptible de détecter une grossesse sur deux. Ce taux de détection augmente progressivement jusqu'à la date prévue des règles.

Si le résultat est « Pas Enceinte » mais que vous suspectez cependant une grossesse, consultez la question 12.

Pour calculer la date présumée de vos règles, calculez la durée habituelle de votre cycle en

comptant le nombre de jours entre le premier jour des règles et la veille du jour où débute votre cycle suivant.

- Si vos cycles sont irréguliers, considérez votre plus long cycle des derniers mois précédant le test.
- Si vous ne connaissez pas du tout la date présumée de vos règles, vous nous recommandons de considérer au moins 19 jours depuis votre dernier rapport non protégé.
- Certains médicaments ou certains états médicaux peuvent-ils affecter le résultat ?**
 - Lisez systématiquement les instructions du médicament que vous prenez actuellement avant d'effectuer un test.
 - Les médicaments contre la stérilité contenant des hCG peuvent entraîner des résultats erronés (ces médicaments contre la stérilité sont habituellement administrés par injection, et un test trop rapproché par rapport à la dernière injection peut entraîner un résultat « Enceinte » faux).
 - Les autres traitements contre la stérilité (tels que le citrate de clomifène), les analgésiques et les contraceptifs hormonaux (pilule contraceptive par exemple) ne devraient pas affecter le résultat.
 - Si vous avez récemment arrêté votre contraception hormonale ou si vous utilisez des traitements contre la stérilité comme le citrate de clomifène, vos cycles peuvent être irréguliers et vous pouvez réaliser le test trop précocement.
 - Si vous avez été enceinte il y a peu (même sans avoir été à terme), il se peut que vous obteniez un faux résultat « Enceinte ».
 - Si vous êtes en période de ménopause ou que vous vous en approchez, vous pouvez obtenir un résultat positif faux, même si vous n'êtes pas enceinte.
 - Une grossesse extra-utérine et des kystes ovariens peuvent entraîner des résultats erronés.
 - Des grossesses multiples ou extra-utérines peuvent entraîner des résultats erronés de l'estimation de l'âge de la grossesse.
 - Une fausse couche peut survenir lorsque votre grossesse est à un stade précoce. Si vous obtenez un résultat « Enceinte », vous pouvez ensuite découvrir que vous n'êtes pas enceinte du fait d'une fausse couche. Dans ces circonstances, l'estimation de l'âge de la grossesse peut afficher des résultats inattendus. Si vous obtenez des résultats inattendus, parlez-en à votre médecin.
- J'ai utilisé le test, mais le symbole d'attente n'est pas affiché. Qu'est-ce que cela signifie ?** Le test n'a pas fonctionné correctement. Consultez la section Erreurs de test.
- J'ai utilisé le test mais aucun résultat n'est affiché à l'écran. Qu'est-ce que cela signifie ?** Votre résultat doit s'afficher à l'écran dans les 3 minutes. Dans le cas contraire, consultez la section Erreurs de test.
- Mon test indique que je suis enceinte. Que dois-je faire ?** Si votre résultat est « Enceinte », consultez votre médecin qui vous indiquera la marche à suivre. Clearblue vous donne uniquement une estimation de l'âge de la grossesse. Votre médecin datera votre grossesse.
- Mon test indique que je suis enceinte, mais je ne pense pas que la date de conception affichée soit correcte. Est-ce possible ?** La précision de l'estimation de l'âge de la grossesse est de 92% en moyenne lorsque le test est réalisé

en utilisant les premières urines du jour. Certains médicaments ou certains états médicaux peuvent affecter le résultat. Consultez la question 5.

- J'ai effectué un test hier et le résultat était « Enceinte ». J'ai effectué un nouveau test aujourd'hui, et selon l'estimation de l'âge de la grossesse, le nombre de semaines depuis la conception est moins important qu'hier. Que dois-je faire ?** La quantité de hCG fluctue à mesure qu'elle augmente, et il est donc possible que l'estimation de l'âge de la grossesse donne des résultats inattendus si vous réalisez des tests plusieurs jours consécutifs. Effectuez un nouveau test dans 5 jours, et si l'estimation de l'âge de la grossesse continue d'indiquer une diminution du nombre de jours depuis la conception, consultez la question 11.
- J'ai effectué un test il y a une semaine et le résultat était « Enceinte ». J'ai effectué un nouveau test, et selon l'estimation de l'âge de la grossesse, le nombre de semaines depuis la conception est moins important. Que dois-je faire ?** Si vous avez effectué le test conformément aux instructions, en utilisant chaque fois les premières urines du jour, mais que l'estimation de l'âge de la grossesse donne des résultats inattendus, consultez votre médecin.
- Mon test indique que je ne suis pas enceinte. Que dois-je faire ?** Il se peut que vous ne soyez effectivement pas enceinte, ou que la quantité d'hormone de grossesse ne soit pas suffisamment élevée pour être détectée, ou encore que vous vous soyez trompée dans le calcul de la date présumée de vos règles.
 - Si vous avez réalisé le test trop tôt, effectuez un nouveau test à la date présumée de vos règles.
 - Si vous avez atteint la date présumée de vos règles, effectuez un nouveau test dans trois jours. Si ce test vous donne un résultat « Pas Enceinte » mais que vous n'avez toujours pas vos règles, consultez votre médecin.

ERREURS DE TEST

Erreur d'utilisation – une erreur s'est produite lors du test. La raison peut être la suivante :

- Vous n'avez pas orienté la tige absorbante vers le bas, ou le test n'a pas été mis à plat après application de l'urine.
- Vous avez appliqué trop ou trop peu d'urine. Effectuez un nouveau test en utilisant un nouveau bâtonnet-test et en veillant à bien respecter les instructions.

Erreur due au test – si l'écran reste vide après utilisation du test, contactez le service consommateurs Clearblue pour de plus amples informations.

ÉLIMINATION DE VOTRE TEST

Avant de jeter le test, retirez la pile du bâtonnet-test. Retirez la pile et jetez-la en respectant le programme de recyclage approprié. Pour ce faire, insérez une pièce dans la fente, au niveau de l'extrémité, et tournez pour ouvrir l'arrière du bâtonnet-test en le cassant. Si vous ne voyez pas la pile, faites glisser le support de pile vers l'extérieur, en direction de la flèche, afin de faciliter le retrait. **Attention :** ne démontez pas la pile, ne la rechargez pas et ne la jetez pas au feu.

CE 0843



Service Consommateurs

Nos conseillers sont disponibles du lundi au vendredi, de 8h à 16h, sauf les jours fériés.

0805 540 267

Appels gratuits depuis un poste fixe. Veuillez nous indiquer le numéro de LOT qui figure sur votre boîte. Les appels sont enregistrés pour des raisons de formation et de contrôle qualité.

	Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>		Numéro de lot		Ne pas réutiliser
	Température à ne pas dépasser 2 °C - 30 °C		À utiliser avant		Fabricant