

Certains médicaments ou certains états médicaux peuvent altérer le résultat de votre test de grossesse :

- Lisez systématiquement les instructions du fabricant relatives aux médicaments que vous prenez actuellement avant d'effectuer le test.
- Les médicaments pour favoriser la fertilité contenant l'hormone hCG peuvent entraîner des résultats erronés (ces médicaments pour favoriser la fertilité sont habituellement administrés par injection et un test trop rapproché par rapport à la dernière injection peut générer un résultat « Enceinte » erroné).
- Les autres traitements de fertilité, les analgésiques et les contraceptifs hormonaux (pilules contraceptives, p. ex.) ne devraient pas affecter le résultat.
- Si vous avez récemment arrêté votre contraception hormonale ou si vous utilisez des traitements de fertilité, vos cycles peuvent être irréguliers, ce qui pourrait vous amener à effectuer le test trop précocement.
- Si vous avez été enceinte récemment (même sans être arrivée à terme), il se peut que vous obteniez un résultat « Enceinte » erroné.
- Une grossesse extra-utérine, des kystes ovariens, la ménopause ou de très rares états médicaux peuvent entraîner des résultats erronés.
- Si vous obtenez un résultat « Enceinte », il est possible que vous receviez ultérieurement un résultat négatif en raison d'une fausse couche naturelle pouvant survenir au cours des premiers stades de la grossesse.

Si vous obtenez des résultats inattendus, parlez-en à votre médecin.

Le Moniteur de Fertilité Avancé Clearblue vous permet de déterminer si vous êtes enceinte en détectant la présence de l'hormone de grossesse, l'hCG, dans vos urines. Il a été démontré en laboratoire que le mini-ordinateur est fiable à plus de 99 % pour détecter une grossesse à compter de la date prévue des règles.

Clearblue vous recommande de réaliser le test dès la date présumée de vos règles. La concentration en hormones de grossesse augmente toutefois rapidement au début d'une grossesse, et le Moniteur de Fertilité Avancé Clearblue peut être utilisé pour déterminer si vous êtes enceinte jusqu'à 3 jours avant la date présumée de vos règles. Lors d'essais cliniques portant sur des échantillons recueillis chez des femmes en tout début de grossesse, le Moniteur de Fertilité Avancé Clearblue a donné les résultats suivants :

Nombre de jours avant la date présumée des règles	% d'échantillons provenant de femmes enceintes donnant un résultat « Enceinte »
-1	96 %
-2	91 %
-3	74 %

Clearblue

Moniteur de Fertilité
Avancé
Tests de grossesse



Ces tests doivent uniquement être utilisés comme tests de grossesse avec le Moniteur de Fertilité Avancé Clearblue. Ils ne peuvent pas être utilisés avec un autre mini-ordinateur Clearblue. Vous devez lire les instructions fournies avec votre mini-ordinateur avant d'utiliser ces tests. Lorsque vous utilisez le mini-ordinateur pour la première fois, vous devez définir un nouveau cycle avant d'effectuer un test de grossesse.

Si vous avez perdu le manuel de votre mini-ordinateur, vous pouvez en demander un autre en appelant l'assistance téléphonique Clearblue ou en télécharger une copie sur www.clearblue.com.

Quelle est la fiabilité du Moniteur de Fertilité Avancé Clearblue ?

Il a été démontré en laboratoire que le Moniteur de Fertilité Avancé Clearblue est fiable à plus de 99 % pour détecter les grossesses à partir de la date présumée de début des règles.



www.clearblue.com

Nos conseillères sont disponibles du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, sauf jours fériés.


0 805 540 267 Service et appel gratuits

Tous les appels sont enregistrés et peuvent être contrôlés pour assurer la qualité du service. Veuillez vous munir du produit, de la boîte ainsi que des papiers d'emballage lors de votre appel.

Votre résultat est « Enceinte » et vous devez consulter votre médecin afin qu'il vous conseille sur les démarches à suivre.



Votre résultat est « Pas enceinte ». Il se peut que vous ne soyez pas enceinte ou, si vous avez effectué le test avant la date présumée de vos règles, que le taux d'hormone de grossesse ne soit pas suffisamment élevé pour être détecté. Faites à nouveau un test à la date présumée de vos règles.

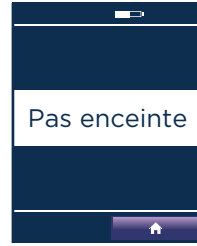

Si vous effectuez un test le jour présumé du début de vos règles et que le résultat est toujours « Pas enceinte », vous pouvez refaire un test trois jours plus tard. Si ce test indique un résultat « Pas enceinte » mais que vous n'avez toujours pas vos règles, consultez votre médecin.

Erreurs de test

Si une erreur survient au cours de la phase de test, l'écran affichera un message d'erreur. Reportez-vous au manuel d'utilisation du mini-ordinateur pour de plus amples renseignements.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse. Clearblue est une marque commerciale de SPD. ©2019 SPD. Tous droits réservés.

Pour usage personnel à domicile. Pour diagnostic *in vitro* uniquement. Ne convient pas à une utilisation interne. Ne pas réutiliser les bâtonnets-tests. Garder hors de portée des enfants. Conserver entre 2° et 30 °C.

Portez à température ambiante pendant 30 minutes si réfrigéré.

Ne pas utiliser le bâtonnet-test si sa pochette protectrice est endommagée.

Ne pas utiliser le bâtonnet-test après la date de péremption.



0123

	Fabricant		Ne pas réutiliser
	Numéro de lot		Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>
	Date de péremption		Température à ne pas dépasser 2 °C - 30 °C

Certains médicaments ou certains états médicaux peuvent altérer le résultat de votre test de grossesse :

- Lisez systématiquement les instructions du fabricant relatives aux médicaments que vous prenez actuellement avant d'effectuer le test.
- Les médicaments pour favoriser la fertilité contenant l'hormone hCG peuvent entraîner des résultats erronés (ces médicaments pour favoriser la fertilité sont habituellement administrés par injection et un test trop rapproché par rapport à la dernière injection peut générer un résultat « Enceinte » erroné).
- Les autres traitements de fertilité, les analgésiques et les contraceptifs hormonaux (pilules contraceptives, p. ex.) ne devraient pas affecter le résultat.
- Si vous avez récemment arrêté votre contraception hormonale ou si vous utilisez des traitements de fertilité, vos cycles peuvent être irréguliers, ce qui pourrait vous amener à effectuer le test trop précocement.
- Si vous avez été enceinte récemment (même sans être arrivée à terme), il se peut que vous obteniez un résultat « Enceinte » erroné.
- Une grossesse extra-utérine, des kystes ovariens, la ménopause ou de très rares états médicaux peuvent entraîner des résultats erronés.
- Si vous obtenez un résultat « Enceinte », il est possible que vous receviez ultérieurement un résultat négatif en raison d'une fausse couche naturelle pouvant survenir au cours des premiers stades de la grossesse.

Si vous obtenez des résultats inattendus, parlez-en à votre médecin.

Le Moniteur de Fertilité Avancé Clearblue vous permet de déterminer si vous êtes enceinte en détectant la présence de l'hormone de grossesse, l'hCG, dans vos urines. Il a été démontré en laboratoire que le mini-ordinateur est fiable à plus de 99 % pour détecter une grossesse à compter de la date prévue des règles.

Clearblue vous recommande de réaliser le test dès la date présumée de vos règles. La concentration en hormones de grossesse augmente toutefois rapidement au début d'une grossesse, et le Moniteur de Fertilité Avancé Clearblue peut être utilisé pour déterminer si vous êtes enceinte jusqu'à 3 jours avant la date présumée de vos règles. Lors d'essais cliniques portant sur des échantillons recueillis chez des femmes en tout début de grossesse, le Moniteur de Fertilité Avancé Clearblue a donné les résultats suivants :

Nombre de jours avant la date présumée des règles	% d'échantillons provenant de femmes enceintes donnant un résultat « Enceinte »
-1	96 %
-2	91 %
-3	74 %

Clearblue

Moniteur de Fertilité Avancé Tests de grossesse



Ces tests doivent uniquement être utilisés comme tests de grossesse avec le Moniteur de Fertilité Avancé Clearblue. Ils ne peuvent pas être utilisés avec un autre mini-ordinateur Clearblue. Vous devez lire les instructions fournies avec votre mini-ordinateur avant d'utiliser ces tests. Lorsque vous utilisez le mini-ordinateur pour la première fois, vous devez définir un nouveau cycle avant d'effectuer un test de grossesse.

Si vous avez perdu le manuel de votre mini-ordinateur, vous pouvez en demander un autre en appelant l'assistance téléphonique Clearblue ou en téléchargeant une copie sur www.clearblue.com.

Quelle est la fiabilité du Moniteur de Fertilité Avancé Clearblue ?

Il a été démontré en laboratoire que le Moniteur de Fertilité Avancé Clearblue est fiable à plus de 99 % pour détecter les grossesses à partir de la date présumée de début des règles.

www.clearblue.com

Nos conseillères sont disponibles du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, sauf jours fériés.

0 805 540 267 Service et appel gratuits


Tous les appels sont enregistrés et peuvent être contrôlés pour assurer la qualité du service. Veuillez vous munir du produit, de la boîte ainsi que des papiers d'emballage lors de votre appel.

Français

Résultat de votre test de grossesse



Votre résultat est « Enceinte » et vous devez consulter votre médecin afin qu'il vous conseille sur les démarches à suivre.

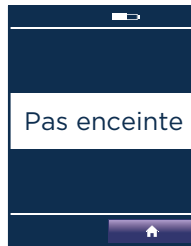

Votre résultat est « Pas enceinte ». Il se peut que vous ne soyez pas enceinte ou, si vous avez effectué le test avant la date présumée de vos règles, que le taux d'hormone de grossesse ne soit pas suffisamment élevé pour être détecté. Faites à nouveau un test à la date présumée de vos règles.

Si vous effectuez un test le jour présumé du début de vos règles et que le résultat est toujours « Pas enceinte », vous pouvez refaire un test trois jours plus tard. Si ce test indique un résultat « Pas enceinte » mais que vous n'avez toujours pas vos règles, consultez votre médecin.

Erreurs de test

Si une erreur survient au cours de la phase de test, l'écran affichera un message d'erreur. Reportez-vous au manuel d'utilisation du mini-ordinateur pour de plus amples renseignements.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse. Clearblue est une marque commerciale de SPD. ©2018 SPD. Tous droits réservés.

Pour usage personnel à domicile. Pour diagnostic *in vitro* uniquement. Ne convient pas à une utilisation interne. Ne pas réutiliser les bâtonnets-tests. Garder hors de portée des enfants. Conserver entre 2° et 30 °C.

Portez à température ambiante pendant 30 minutes si réfrigéré.

Ne pas utiliser le bâtonnet-test si sa pochette protectrice est endommagée.

Ne pas utiliser le bâtonnet-test après la date de péremption.



0843

	Fabricant		Ne pas réutiliser
	Numéro de lot		Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>
	Date de péremption		Température à ne pas dépasser 2 °C - 30 °C

Test

Le mini-ordinateur demandera uniquement de faire des tests de fertilité. Il estimera la date présumée de vos règles, mais vous pouvez faire un test de grossesse n'importe quel jour, à condition d'avoir défini un cycle. Vous pouvez effectuer un test une seule fois pendant votre plage horaire de test. Toutefois, si vous obtenez un message d'erreur, vous pouvez recommencer en utilisant un nouveau test. Si vous voulez recueillir vos urines pour effectuer un test plus tard (par exemple, si vous avez besoin d'aller aux toilettes avant le début de votre plage horaire de test), utilisez un récipient propre et sec et conservez-le à température ambiante jusqu'à ce que vous soyez prête à faire le test. Pensez à bien effectuer le test au cours de la plage horaire des tests définie.


- 1 Lorsque vous êtes prête à effectuer le test, sélectionnez le test approprié. Les tests de grossesse sont dans une pochette blanche.



- 2 Ouvrez la pochette, prenez le test et utilisez-le immédiatement.



Ne tenez pas le test en dirigeant l'extrémité absorbante vers le haut, car cela pourrait avoir une incidence sur le résultat.

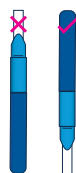

- 3 Choisissez votre méthode de test :

Sous votre jet d'urine

Dirigez simplement l'extrémité absorbante vers le bas et maintenez-la sous votre jet d'urine pendant **seulement 3 secondes**.




OU

Dans un récipient


Recueillez vos urines dans un récipient propre et sec puis trempez uniquement l'extrémité absorbante dans l'urine, comme indiqué, pendant **seulement 15 secondes**.



- 4 Retirez le capuchon.

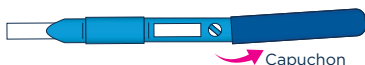


- 5 Placez le capuchon sur l'extrémité absorbante. Essayez l'excès d'urine.

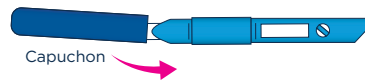


- 6 Insérez immédiatement le test dans le mini-ordinateur. Si le mini-ordinateur est éteint, allumez-le et **attendez que l'écran Clearblue disparaisse avant d'insérer le test.**

- 7 Localisez la fente de lecture.

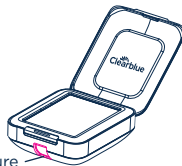


- 8 Tenez le mini-ordinateur à plat ou posez-le sur une surface plane.


- 9 Insérez le test de telle sorte que la partie biseautée se situe sur le bord inférieur du test et que la partie colorée du test soit située à droite de la fente de lecture.

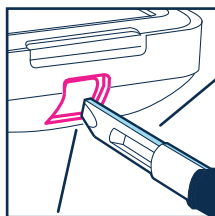


Encoche du test dirigée vers le bas

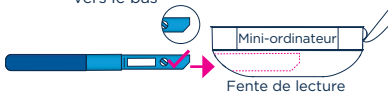

- 10 Appuyez sur le test jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

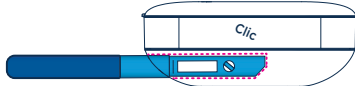

- 11 Le mini-ordinateur confirmera l'insertion adéquate du test et déterminera s'il s'agit d'un test de fertilité ou d'un test de grossesse. Une fois cette procédure effectuée, un écran de compte à rebours s'affichera à l'écran.

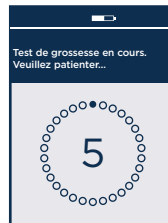

Ne retirez pas le test durant le compte à rebours. Si vous retirez le test trop tôt, un message d'erreur va s'afficher.

L'écran va s'éteindre après 1 minute mais le mini-ordinateur continuera d'analyser le test. Le voyant lumineux du test va clignoter.

- 12 Patientez 5 minutes pour obtenir votre résultat.
- 13 Si vous rallumez le mini-ordinateur, l'écran affichera le temps pendant lequel vous devez attendre. Lorsque le test sera terminé, l'alarme sonnera et le voyant lumineux du test s'arrêtera de clignoter.
- 14 Si le mini-ordinateur est éteint, rallumez-le et retirez le test.
- 15 Lisez votre résultat. Le résultat est lisible uniquement sur le mini-ordinateur et ne peut être déterminé par les lignes que vous pourriez voir sur le test.
- 16 Jetez le test avec vos déchets ménagers ordinaires. Ne réutilisez jamais un test.

À NE PAS FAIRE

Ne pas insérer l'extrémité absorbante dans le mini-ordinateur.



Ne pas insérer le test avec l'encoche dirigée vers le haut.



Ne pas insérer le capuchon dans le mini-ordinateur.

